

Tener en cuenta lo siguiente:

- La espacio donde se instalará la cama de hospital debe tener piso firme y/o nivelado.
- En caso de que la cama no lleve a cabo su función de elevar, favor de revisar el **pistón** abajo de la cama.



- **El pistón deberá contar con un tornillo en medio.** En caso de que no lo tenga, puede adquirirlo en alguna ferretería.
- Así mismo, verifique que las otras piezas de abajo de la cama cuenten con sus tornillos, pues estos permiten que la cama lleve a cabo su función.



SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

contacto@sanaencasa.org



CAMA DE HOSPITAL MANUAL

Características, uso y recomendaciones



www.sanaencasa.org

¿Qué es?

La cama de hospital es un equipo médico que procura la comodidad, seguridad, sueño y alivio del dolor a una persona. Además, facilita la realización de cuidados por parte del responsable, disminuyendo el esfuerzo de este.

¿Cómo se arma una cama de hospital?


Primeramente, se coloca la cabecera en el lugar donde se habrá de instalar. Procure que se cuente con piso firme y/o nivelado.



Coloque el seguro de las llantas. Haga presión en la pestaña de abajo para inmovilizar.



Con ayuda de alguien, coloque la base de la cama. Las piezas de anclaje deberán estar sujetas a los tornillos de la cabecera.

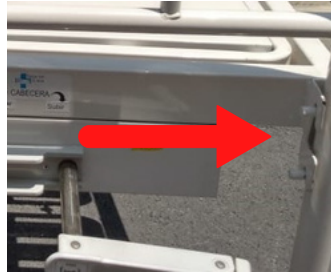

Esto mismo se repite con la pieza que corresponde al pie de cama. Las palancas deben quedar hacia un espacio donde tengamos acceso a ellas.



Una vez instalada la cama, verifique que las elevaciones si se llevan a cabo.



Palanca izquierda: Elevación de piernas.
Palanca derecha: Elevación de cabecera.

Si requiere mover la cama, deberá retirar los seguros de las llantas presionando la pestaña de arriba. Cuando ya no sea necesario moverla, colóquelos de nuevo para mayor seguridad.

Uso de las palancas:

Preferentemente, procure que las palancas se encuentren dobladas hacia la cama y no estiradas, se puede evitar un golpe. Se utilizan de la siguiente manera:



Estire y desdoble la palanca.



Gire y vuelva a colocarla en su lugar tras usarla.

