



Coloque los barandales y elija la altura que considere adecuada.



Tener en cuenta lo siguiente:

- La espacio donde se instalará la cama de hospital debe tener piso firme y/o nivelado.
- En caso de que la cama no lleve a cabo su función de elevar, favor de revisar que todas las piezas estén colocadas correctamente.
- Verifique que todas las piezas esté unidas por un tornillo y/o seguro.



SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm
contacto@sanaencasa.org



www.sanaencasa.org

¿Qué es?

La cama de hospital es un equipo médico que procura la comodidad, seguridad, sueño y alivio del dolor a una persona. Además, facilita la realización de cuidados por parte del responsable, disminuyendo el esfuerzo de este.

¿Cómo se arma una cama de hospital?

- Primeramente, se coloca la cabecera en el lugar donde se habrá de instalar la cama. Procure que el piso sea firme para evitar daños o complicaciones.



Aunque sean similares las piezas, la cabecera de la cama se identifica por el hecho de que NO tiene la palanca.

- Con ayuda de alguien, coloque la base de la cama. Los tornillos deben quedar justamente en la pieza de anclaje.



- Esto mismo se repite con la pieza que corresponde al pie de cama. Las palancas deben quedar hacia un espacio donde tengamos acceso a ellas.




- Las palancas deben ubicarse en el pie de cama y preferentemente en un área despejada donde se tenga acceso a ella.

Una vez instalada la cama, colocará el tubo que permite la elevación de la cama. Se pone por debajo y debe procurar que los extremos embonen con la cabecera y pie de cama.



Verifique que las piezas encajen completamente.

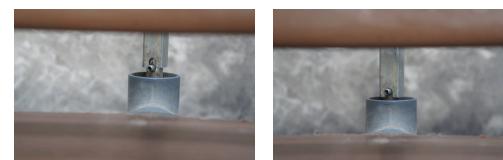

- Cuando terminé de instalar dicho tubo, utilice la palanca de en medio para verificar que la cama si sube o baje.



Girar a la izquierda para bajar y girar a la derecha para subir.

Uso de las palancas:

Preferentemente, las palancas deben encontrarse colgando de la cama de modo que no pueda afectar el paso de alguien y evitar un golpe. Para usarlas o guardarlas, haga lo siguiente:



- Tome la palanca y estire. Automáticamente la palanca deberá flexionarse hacia abajo.



Instalación de barandales:

Tome los bastones que sujetarán los barandales, coloque uno en la cabecera y otro en los pies de la cama. Ajuste según el ancho de la cama y verifique que la ranura quedé sujetada a la estructura de la cama. A continuación se le indica como: